



Die SAM® SPLINT Universalschiene

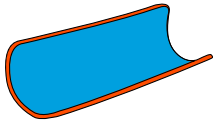


Falten Sie die Schiene, so daß Sie zwei gleich lange Seiten erhalten. Um der Schiene die notwendige Stabilität zu geben, biegen Sie jede der beiden Seiten mit Ihren Daumen vorsichtig in der Mitte durch.

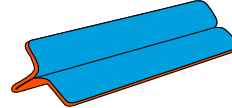


Eine T-Faltung erhöht die Stabilität der Schiene erheblich.


Die oben gezeigte Schiene kann um den Arm, am Unterarm oder an den Knöcheln angelegt und mit Klebestreifen, Wickel oder Bandage fixiert werden.

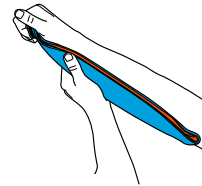


Die Stabilität der Schiene kann durch Verdoppelung erhöht werden. Damit wird die Schiene fest genug, um als Armkissen für IV-Injektionen oder bei Radiusfrakturen eingesetzt zu werden.

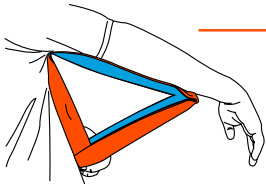


Zur Abstützung ausgenerkter Schultern geben Sie der Schiene eine dreieckige "DELTA"-Form.

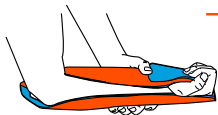

Zur Schienung von Handgelenk oder Unterarm sollte die Schiene um den Ellenbogen gefaltet werden.

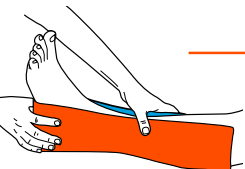

Der Knöchel wird mit einer einzigen Schiene gesichert, die unter dem Fuß gefaltet und an beiden Seiten angelegt wird.

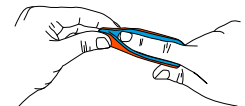

Fingerschiene halbrund formen und an einer Seite zusammen drücken.



Bei Knie- oder Beinverletzungen kann auf jeder Seite des Beines jeweils eine Schiene angebracht werden.

